



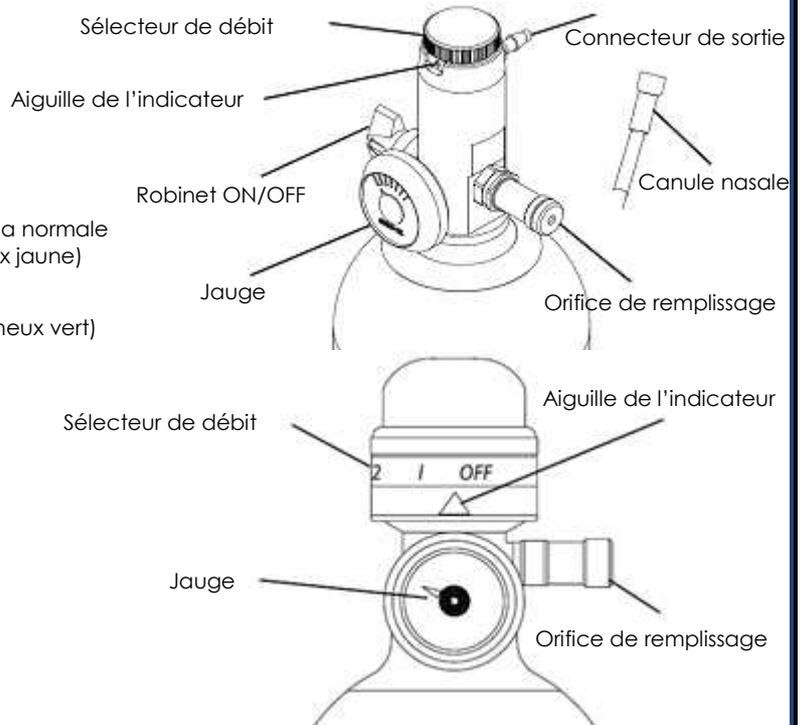

Yes, you can.®

## GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE *Invacare®HomeFill® II*

Merci d'avoir choisi **HomeFill II**. Ce guide de démarrage rapide ne remplace en aucun cas le manuel de l'opérateur. Il a pour but de guider le patient uniquement dans les différentes étapes de fonctionnement de cet appareil.

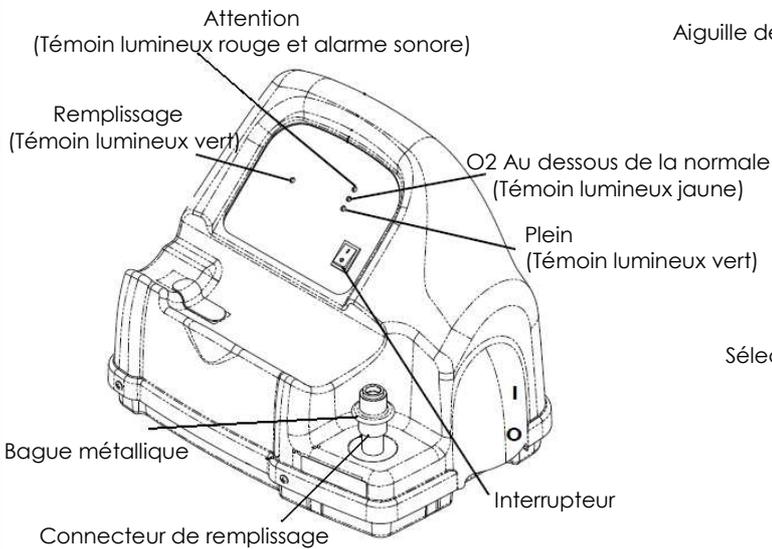

1. Brancher le **HomeFill II**.



2. Allumer votre concentrateur d'oxygène *Invacare*.



3. Raccorder le compresseur **HomeFill II** à votre concentrateur d'oxygène.



4. Pour remplir la bouteille en débit continu, mettre en position 0 et ouvrir le robinet ON/OFF. **Le laisser ouvert sur ON.**



4'. Pour remplir la bouteille avec valve en débit pulsé et continu, **mettre en position off.**



5. Abaisser la bague métallique avant d'enclencher la bouteille. Les points verts du connecteur apparaissent.



6. Enclencher sans efforts la bouteille dans le connecteur de remplissage du compresseur **HomeFill II**.



7. Vérifier que la bille noire sur le débitmètre du concentrateur soit positionnée **au centre du trait**, en fonction du débit prescrit par votre médecin.



Yes, you can.

## GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Invacare®HomeFill® II

Merci d'avoir choisi **HomeFill II**. Ce guide de démarrage rapide ne remplace en aucun cas le manuel de l'opérateur. Il a pour but de guider le patient uniquement dans les différentes étapes de fonctionnement de cet appareil.



### 8. Allumer le compresseur **HomeFill II**.

Le voyant orange «O<sub>2</sub> en dessous de la normale» s'allume. **Attendre entre 3 et 10 minutes** avant que le voyant vert «remplissage» s'allume.



9. Durée de remplissage, **environ 2H** sur une bouteille de 1,7L. La bouteille possède une jauge qui vous permet de vérifier son niveau de remplissage. La bouteille est pleine à 2000 Psi à la fin de la zone verte.



10. Le voyant vert «Plein» s'allume en façade du compresseur pour indiquer que la bouteille est pleine.



11. Une fois remplie, le compresseur s'arrête automatiquement mais il est nécessaire d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour l'éteindre complètement. Eteindre le concentrateur si nécessaire.



12. Pour retirer la bouteille du **HomeFill II**, il suffit d'**abaisser la bague métallique** du connecteur de remplissage tout en maintenant la tête de la bouteille. Puis enlever la bouteille.



13. Connecter la canule nasale à la bouteille.



14. Sur la bouteille à débit continu **laisser le robinet ouvert sur ON**, et régler sur la position de débit prescrite par votre médecin. Pour la fermer mettre sur position 0 au niveau du sélecteur de débits.



15. Sur la bouteille avec valve en débit pulsé et continu, régler sur la position de débit prescrite par votre médecin. Pour la fermer mettre sur position 0.



**Pendant le remplissage d'une bouteille par le HomeFill II, le débit d'utilisation du concentrateur ne doit pas dépasser :**  
2,5 L/min sur un concentrateur 5 L  
5 L/min sur un concentrateur 9 L

## Autonomie des bouteilles

### Bouteille en débit continu 1,7L :

Débit continu en l/mn	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Autonomie moy.	16h	8h	5h20	4h	2h40	2h	1h30	1h20	1h	50mn	40mn

### Bouteille en débit pulsé/continu 1L :

Débit pulsé	1	2	3	4	5
Autonomie moy.	9h50	5h40	4h15	3h30	3h
Débit continu en l/mn		2			
Autonomie moy.		1h20			

### Bouteille en débit pulsé/continu 1,7L :

Débit pulsé	1	2	3	4	5
Autonomie moy.	15h	8h40	6h30	5h20	4h40
Débit continu en l/mn		2			
Autonomie moy.		2h			