

UTILISATION SIMPLIFIÉE DU CONCENTRATEUR 525KS

SÉRIES F, J, R et B

Emplacement du concentrateur dans le lieu d'utilisation

(Ne branchez pas votre appareil à une prise de courant commandée par un interrupteur mural. Aucun autre appareil électrique ne doit être branché sur la prise de courant murale.)

Pour le bon fonctionnement de votre appareil :

1. Veillez à le faire fonctionner dans une pièce non humide, ventilée, exempte de polluants (fumée, graisse de cuisine...).
2. Tenir le concentrateur d'oxygène 525KS à au moins 16 cm des murs, draperies, ou de tout autre objet pouvant empêcher la bonne circulation de l'air.
3. Mettre l'unité à une distance minimale de 1,60 m des sources de chaleur.
4. La distance maximale autorisée entre le concentrateur et le patient est de 15 m via un tuyau à oxygène indéformable auquel on ajoute un humidificateur et une canule de 2,1 m.



Avant d'utiliser votre concentrateur 525KS

Avant chaque utilisation, contrôlez toujours la propreté du filtre poussière (situé à l'arrière de votre appareil).

1. Fixez les accessoires d'oxygène appropriés à la sortie d'oxygène. (fig.1)

2. Connexion du tube d'oxygène et de l'humidificateur

Connexion du tube d'oxygène : (fig.2)

- a. Vissez le raccord de sortie d'oxygène à l'orifice de sortie d'oxygène du concentrateur.
- b. Insérez le tube à oxygène directement au raccord.

Connexion du tube d'oxygène à l'humidificateur : (fig.3)

Si votre médecin a inclus un humidificateur dans votre thérapie, veuillez suivre les étapes suivantes :

- a. Remplissez la bouteille de l'humidificateur avec de l'eau distillée. Évitez de trop remplir. (Si vous utilisez une bouteille pré-remplie, passez à l'étape suivante.)
- b. Vissez la connectique papillon située sur le dessus de la bouteille de l'humidificateur à la sortie d'oxygène afin que la bouteille soit suspendue. Assurez-vous qu'elle soit bien serrée.
- c. Fixez le tube d'oxygène directement au raccord de sortie de la bouteille de l'humidificateur.

3. Votre médecin vous a prescrit soit une canule nasale soit un masque facial : dans la plupart des cas, ils sont déjà attachés au tube d'oxygène. Dans le cas contraire, veuillez suivre les directives du fabricant.

fig.1



fig.2



fig.3



09/2020 - 1/2 - Rev. 2

UTILISATION SIMPLIFIÉE DU CONCENTRATEUR 525KS

Mise en marche de votre concentrateur d'oxygène 525KS

1. Retirez et déroulez complètement le cordon d'alimentation de l'appareil. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation soit en position « OFF » et insérez la fiche dans la prise murale (séries F,J,R).
2. Basculez l'interrupteur en position « ON ». Brièvement, les quatre voyants (ou les trois voyants pour le série B) du panneau avant s'allument simultanément et un signal sonore retentit.
3. Réglez le débit de votre concentrateur sur le débit prescrit par votre médecin, en tournant la molette de réglage. (+ sens horaire, - sens anti-horaire).

Attention : Respectez la plage de réglage de votre appareil (0.5 L/min à 5 L/min). Si la bille du débitmètre ne se situe pas dans cette plage, votre appareil se mettra en défaut.




L'entretien de votre concentrateur d'oxygène 525KS

(Effectuez cette procédure au moins une fois par semaine.)

Nettoyage du filtre poussière :

1. Débranchez le concentrateur d'oxygène de la prise murale.
2. Retirez le filtre mousse situé à l'arrière du concentrateur.
3. Nettoyez le filtre avec un aspirateur ou dans de l'eau savonneuse et rincez-le bien.
4. Séchez complètement le filtre avant la réinstallation.

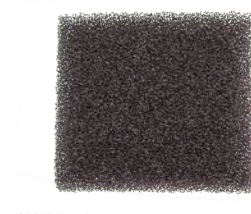

Nettoyage du boîtier extérieur :

1. Essuyez le boîtier extérieur avec un chiffon ou une éponge imbibée d'un produit de nettoyage non-agressif.
2. Seulement si nécessaire, essuyez-le avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.



09/2020 - 2/2 - Rev. 2