

## L'humidificateur MR810 a deux modes de fonctionnement pour la mise en marche.

### Sans mémoire du réglage\*

Lorsque le bouton marche/arrêt est actionné. Le réglage par défaut (niveau humidité 3) est restitué quelque soit le réglage avant l'arrêt.

\*Le mode par défaut en sortie usine.



### Avec mémoire du réglage

Lorsque le bouton marche/arrêt est actionné. Le dernier réglage ajusté avant l'arrêt est restitué.



**Pour basculer d'un mode à l'autre, il suffit d'appuyer sur les boutons marche/arrêt et température tout en branchant la prise secteur.**

Dans les deux modes, si le MR810 est débranché de sa prise secteur (**sans appuyer sur le bouton marche/arrêt**), le dernier réglage ajusté avant le débranchement est restitué.



*Le détail des procédures du contrôle des performances est disponible dans le manuel technique réf. 185042601 disponible auprès de FISHER & PAYKEL HEALTHCARE.  
Tél.: 01 64 46 52 01 / Fax. 01 64 46 52 21*